

AIR TREATMENT HOOD



อุปกรณ์ให้อากาศบริสุทธิ์ชนิดครอบศีรษะ

ใช้สำหรับทำให้อากาศบริสุทธิ์ สำหรับไว้หายใจหรือป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ โดยต่อกับ FILTER (อุปกรณ์เสริม สามารถเลือกซื้อได้ตามการใช้งาน)

MODEL : AB-01

Part Name	High pressure mini blower fan
Max pressure	5 kPa
Current at max pressure	1.6 A
Max airflow	240 L/min
Current at max airflow	4.5 A
Hall sensor electric angle	60 degree
Magnet poles pair	1 pole pair
Resistance	1.9 Ohms
Inductance	0.2 mH
Noise level	65 dBA
Protection class	IP 20
Type	Centrifugal fan
Speed	36,000r/min
Electric current type	DC
Voltage	12 VDC
Battery	LiFePo4 12V 5 A



AIR TREATMENT HOOD WITH AIR BLOWER

วิธีใช้ เมื่อผู้ใช้ประกอบเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่อง Blower (ตัวจ่ายอากาศ) ให้ HOOD พองเต็มที่พอดี ปรับสวิตช์อัตราการไหล ของอากาศเข้า HOOD ให้ผู้ใช้รู้สึกสบาย ไม่อึดอัด ส่วนช่องสำหรับต่อ อุปกรณ์เสริม ถ้าไม่ใช้ให้ปิดไว้ด้วยจุกยาง

วัสดุที่ใช้ผลิต HOOD ทำจากพลาสติก PVC
ขอบ HOOD และ Neck Ring ทำจากพลาสติก ABS
Neck Seal : O-ring : Other Function Plug ทำจาก Natural Rubber

คำแนะนำการใช้งาน ผู้ใช้อุปกรณ์นี้ต้องมีความรู้และประสบการณ์เรื่องของห้องปรับบรรยากาศ ความดันสูง และความรู้เรื่องการกรองอากาศ



การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C จะช่วยยืดอายุการใช้งาน

การทำความสะอาด ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อน หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปราศจากแอลกอฮอล์ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้กับผู้ที่มิใช่พลบริเวณลำคอ
ควรศึกษาหน้าที่และวิธีใช้งานของอุปกรณ์อย่างละเอียด
ควรตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีรอยร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง
ปรับอุปกรณ์ให้มีความพอดีกับผู้ใช้งานเสมอ



วิธีใช้งาน เมื่อผู้ใช้ประกอบ (ตามภาพ) และเปิดเครื่อง BLOWER (ตัวจ่ายอากาศ) ให้ HOOD พองเต็มที่พอดี ปรับสวิทช์อัตราการไหลของอากาศเข้า HOOD ให้ผู้ใช้รู้สึกสบาย ไม่อึดอัด ส่วนช่องสำหรับต่ออุปกรณ์เสริม ถ้าไม่ใช้ให้ปิดไว้ด้วยจุกยาง

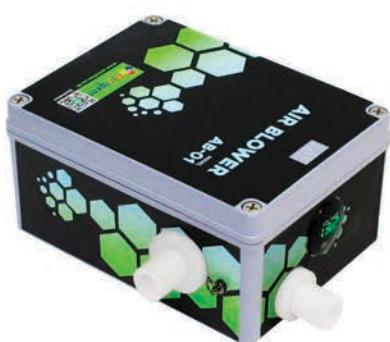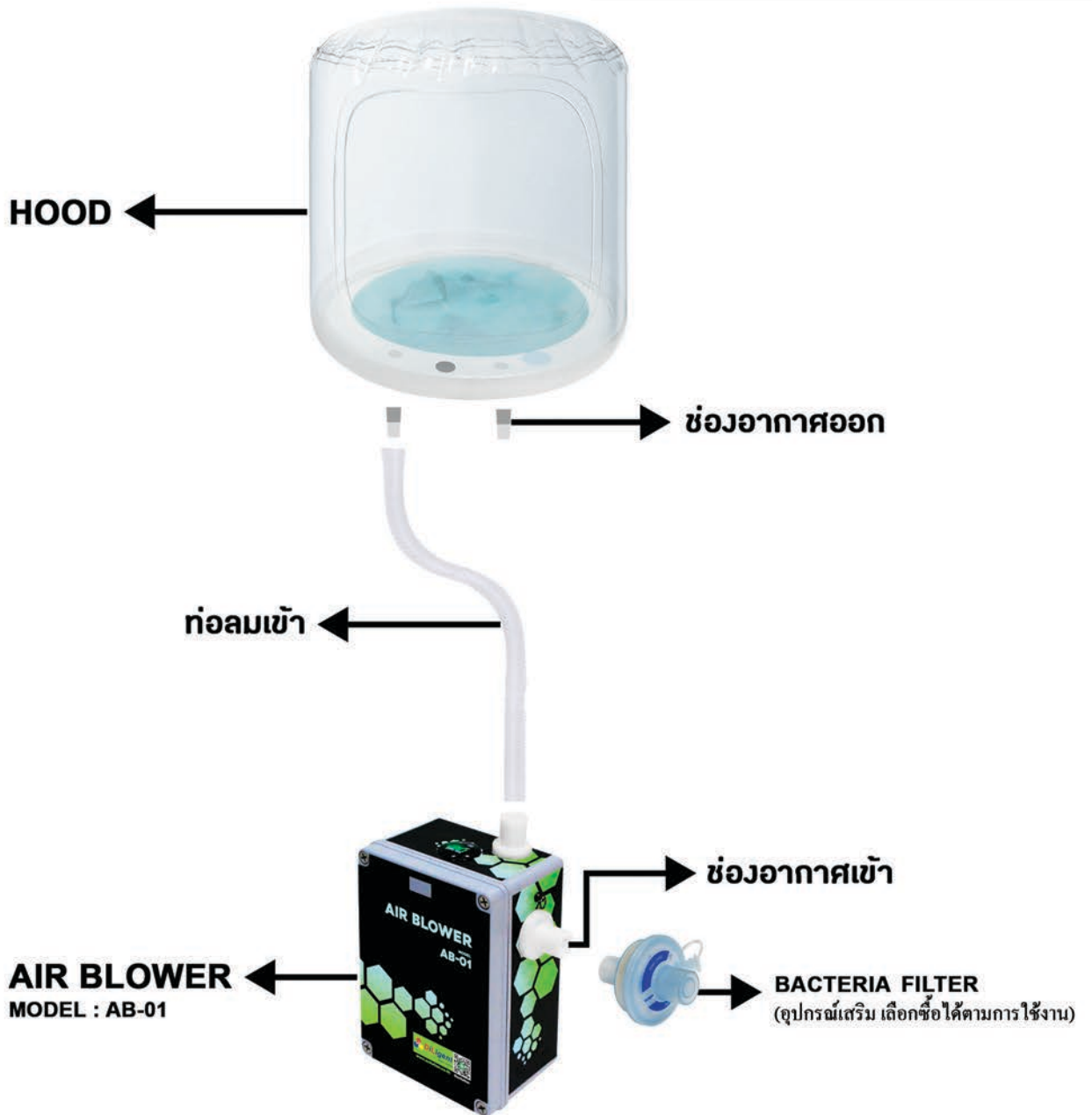

วิธีการประกอบ HOOD



HOOD
พลาสติกใสครอบศีรษะ




ZIPPER
ซิปช่วยในการสวมใส่สะดวก

NECK SEAL
พลาสติกครอบคอก
เส้นรอบวง 12 นิ้ว



NECK RING
ห่วงครอบคอก

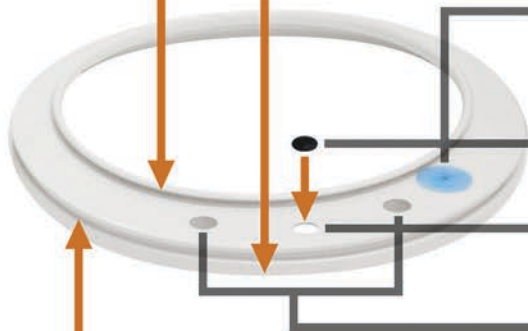

NON RETURN VALUE
ตุ๊กยางอุดช่องต่ออุปกรณ์เสริม

OTHER FUNCTION PLUG
ตุ๊กยางอุดช่องต่ออุปกรณ์เสริม

OTHER FUNCTION PORT
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม

SUPPLY & EXHAUST PORT
ช่องต่อแก๊สเข้า-ออก

O-RING
ยางกันรั่วซึม

